

**PowerTel  
2880**



**Handleiding**



# Inhoudsopgave

<b>Inbedrijfstelling</b> .....	<b>60</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	60
<b>Het telefoonsysteem opstellen</b> .....	<b>60</b>
Installatieplek .....	60
Tafeltoestel aansluiten .....	61
De handset in bedrijf stellen .....	63
Het laadstation aansluiten .....	64
De noodbatterijen plaatsen .....	65
Het tafeltoestel op een wand monteren .....	66
<b>Bedieningselementen</b> .....	<b>69</b>
Handset .....	69
Tafeltoestel .....	72
<b>Symbolen in de display</b> .....	<b>76</b>
<b>Door het menu navigeren</b> .....	<b>77</b>
Hoofdmenu openen (handset) .....	77
Menuoverzicht (handset) .....	77
Hoofdmenu openen (tafeltoestel) .....	78
Menuoverzicht (tafeltoestel) .....	79
<b>Eerste inbedrijfsname</b> .....	<b>80</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>81</b>
Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen .....	81
Handsfree bellen .....	81
Audio-hulp .....	82
Equalizer .....	82
Volume instellen .....	82
Microfoon uitschakelen .....	82
Beltoon uitschakelen .....	83
Nummerherhaling .....	83
Oproeplijst .....	84
Opeenvolgende nummers kiezen .....	84
De handset bellen (oproepsignaal/paging) .....	85

Intern gesprek . . . . .	85
Extern gesprek intern doorverbinden . . . . .	86
Conferentie . . . . .	87
<b>Telefoonboek . . . . .</b>	<b>87</b>
Een contact opslagen in het telefoonboek . . . . .	88
Nummer uit telefoonboek gebruiken . . . . .	88
<b>Fotosneltoetsen . . . . .</b>	<b>89</b>
Fotosneltoets opslaan . . . . .	89
Fotosneltoets bewerken . . . . .	89
Fotosneltoets wissen . . . . .	89
Fotosneltoets selecteren . . . . .	90
<b>Herinneringsberichten . . . . .</b>	<b>90</b>
Een herinneringsbericht toevoegen . . . . .	90
Herinneringsbericht controleren . . . . .	91
Een herinneringsbericht wissen . . . . .	92
<b>Instellingen . . . . .</b>	<b>92</b>
Beltonen . . . . .	92
De toetstoon op het tafelhoestel . . . . .	92
Tonen op de handset . . . . .	92
Datum/tijd instellen . . . . .	93
Tijdsformaat instellen . . . . .	93
Datumformaat instellen . . . . .	93
Displaytaal instellen . . . . .	94
De taal voor de standaard begroeting instellen . . . . .	94
MWI wissen . . . . .	95
De naam van het toestel wijzigen . . . . .	95
CID-tijdssynchronisatie . . . . .	96
Kiesmethode instellen . . . . .	96
Flashtijd instellen . . . . .	96
Extra handsets registreren (tafelhoestel) . . . . .	97
Nachtmodus . . . . .	98

<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>98</b>
Antwoordapparaat aan-/uitschakelen .....	99
Berichten beluisteren .....	99
Eigen begroeting opnemen .....	101
Meeluisteren .....	101
Een oproep overnemen .....	103
Berichten wissen .....	103
Memo opnemen .....	103
Opnamevertraging instellen .....	104
Pincode van antwoordapparaat instellen .....	104
Akoestisch signaal voor berichten .....	105
Opnametijd instellen .....	106
Het antwoordapparaat op afstand bedienen .....	106
<b>Bijlage</b> .....	<b>108</b>
In geval van een storing .....	108
Veiligheidsinstructies .....	108
Rechtmatig gebruik .....	108
Installatieplek .....	109
Stroomvoorziening .....	109
Energiezuinige adapter .....	109
Medische apparaten .....	110
Accu's/batterijen .....	110
Compatibiliteit met hoorapparaten .....	110
Gescheiden inzameling .....	110
Technische gegevens .....	111
Onderhoudsinstructies .....	112
Garantie .....	112
Conformiteitsverklaring .....	114

# Inbedrijfstelling

**Belangrijk: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de veiligheidsaanwijzingen vanaf blz 108.**

## Inhoud van de verpakking controleren

In de verpakking van de PowerTel 2880 zit het volgende:

- 1 tafelhoestel (basisstation)
- 1 hoorn
- 1 hoornaansluitsnoer
- 1 adapter voor het tafelhoestel
- 1 draadloze telefoon (mobiele telefoon)
- 3 NiMH-batterijen AAA
- 1 deksel voor batterijvakje
- 1 laadstation
- 1 adapter voor laadstation
- 1 telefoonkabel

**Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 2880 meegeleverde adapters, telefoonkabel en batterijen. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd.**

## Het telefoonsysteem opstellen

### Installatieplek

Plaats het tafelhoestel in de buurt van een stopcontact en van de telefooncontactdoos, zodat de lengte van de telefoonkabel voldoende is. Bewaar een afstand van ongeveer 1 meter tot andere elektronische apparaten, om een wederzijdse interferentie te voorkomen. De verbinding tussen het tafelhoestel en de handset


gebeurt via radiosignalen. De signaalsterkte is afhankelijk van de installatieplek. De maximale reikwijdte bij een ongehinderde zichtlijn is 300 meter; wanneer muren en andere hindernissen aanwezig zijn, is de maximale reikwijdte kleiner.

## Tafeltoestel aansluiten

1. Steek de kabelstekker in de overeenkomstige ingang op de onderkant van het tafeltoestel en sluit de adapter aan op het stopcontact.
2. Steek de kleine stekker van de telefoonkabel in de overeenkomstige ingang van het tafeltoestel en het andere uiteinde in de telefooncontactdoos op de wand.
3. Sluit de hoorn met behulp van het gekrulde hoornsnoer aan op het tafeltoestel.

**Opmerking:** Steek de telefoonkabel door de kabelklemmen zodat het tafeltoestel vlak op de ondergrond staat.


Bij apparaten met stekker moet het wandstopcontact (de adapter) zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

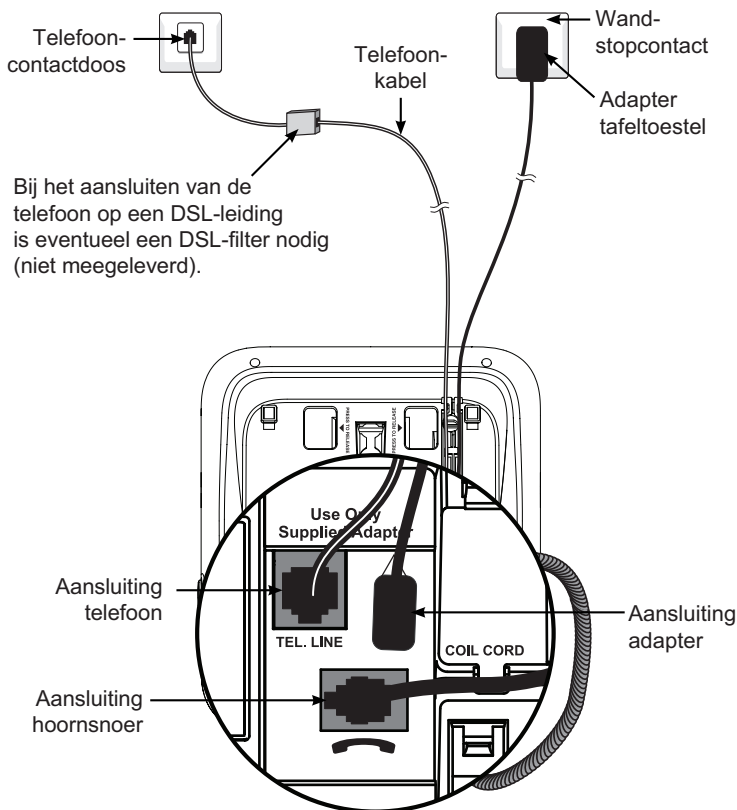

**Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 2880 meegeleverde adapters, telefoonkabel en batterijen. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.**

## De handset in bedrijf stellen

1. Open het batterijvak en leg er de batterijen in.  
Let op de polariteit.
2. Schuif het deksel terug op het batterijvak en zorg ervoor dat het vastklikt.

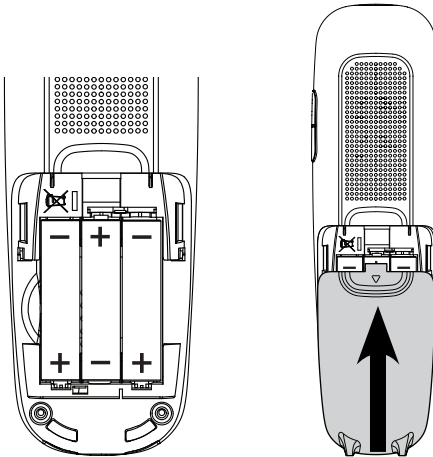


Om de handset volledig op te laden, moet hij minstens 16 uur in het laadstation blijven staan (controleer of de spanning naar het laadstation ingeschakeld is!).

**Belangrijk: Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen. Ook wanneer u later de batterijen vervangt, mag u alleen dit type accu gebruiken.**



## Het laadstation aansluiten

1. Steek de kabelstekker in de ingang op de onderkant van het laadstation en sluit de adapter aan op het wandstopcontact.

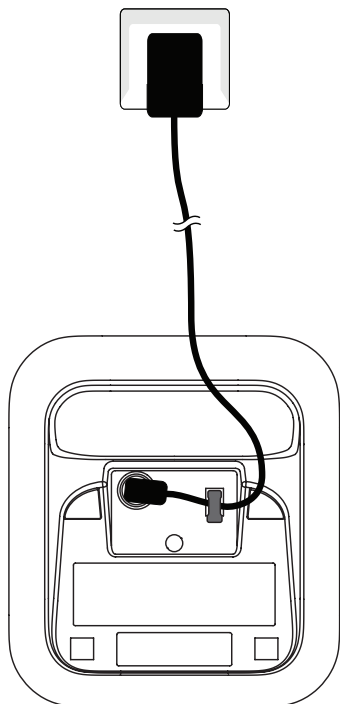

2. Zet de handset in het laadstation om hem op te laden.

**Opmerking:**Steek de aansluitkabel door de kabelklemmen zodat het laadstation vlak op de ondergrond staat.


Bij apparaten met stekker moet het wandstopcontact (de adapter) zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

## De noodbatterijen plaatsen

Leg 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het tafeltoestel, zodat u in geval van stroomuitval de telefoon verder kunt blijven gebruiken.

**OPGELET: Haal altijd de stekker van het tafeltoestel uit het wandstopcontact voordat u batterijen plaatst/vervangt!**

1. Ontgrendel het deksel van het batterijvak en verwijder het deksel.
2. Leg 3 AAA-batterijen in het batterijvak (zorg voor een correcte polariteit!).

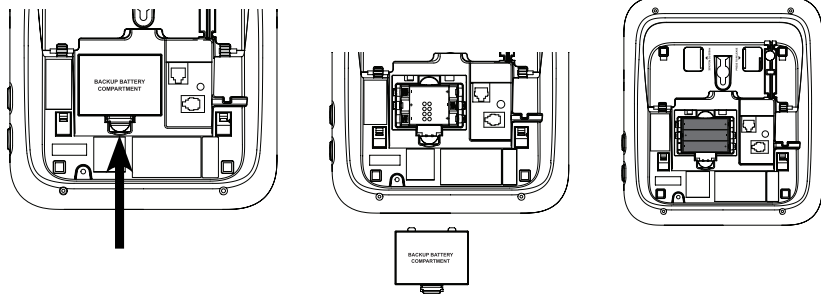

3. Schuif het deksel terug op het batterijvak en zorg ervoor dat het deksel vastklikt.


**Opmerking:** Bij normaal gebruik moet u de batterijen elke 6 maanden vervangen, om een correcte werking te garanderen. De levensduur van de batterijen wordt beïnvloed door de frequentie en duur van een stroomuitval.

## Het tafeltoestel op een wand monteren



Om het tafeltoestel op een wand te monteren, hebt u 2 pluggen en 2 gepaste schroeven nodig, bij voorkeur met bolcilinderkop en met een diameter van 4 mm. Breng de schroeven op een onderlinge afstand van 83 mm loodrecht onder elkaar aan en laat de kop ongeveer 3 mm uit de wand steken.

**OPGELET: Houd bij het boren van de gaten rekening met stroom- en waterleidingen!**


1. Haal de stekkers van de adapter en van de telefoonaansluitkabel uit het tafeltoestel.
2. Haal de houder uit het hoornvak en steek de houder er 180° gedraaid opnieuw in.

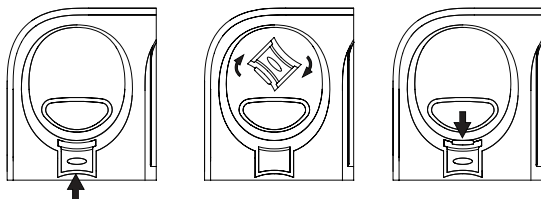


3. Druk de lussen samen, zoals de pijlen aangeven, om de scharnierhaken te openen. Leg de telefoonkabel en de adapterkabel door het gat van de wandhouder. Steek het uiteinde van de telefoonkabel in de telefooningang en steek de stekker van de adapter in de adapteringang op de onderkant van de telefoon.

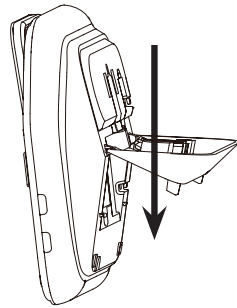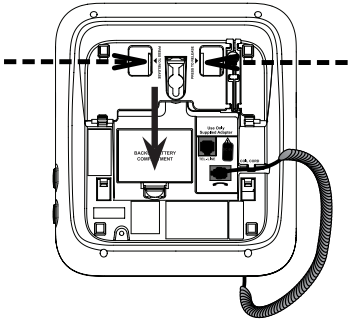

4. Klap de wandhouder naar onderen en vergrendel hem. Leg de telefoonkabel en de adapterkabel door de gleuf aan de onderkant van de telefoon. Bind de telefoonkabel en de adapterkabel indien nodig samen met behulp van een kabelklem.

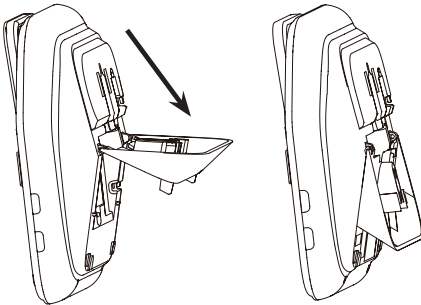


5. Sluit de adapter en de telefoonkabel opnieuw aan op het stopcontact en de telefooncontactdoos.
6. Plaats het tafeltoestel op de schroefkoppen en trek voorzichtig het tafeltoestel naar onderen tot het vastzit.

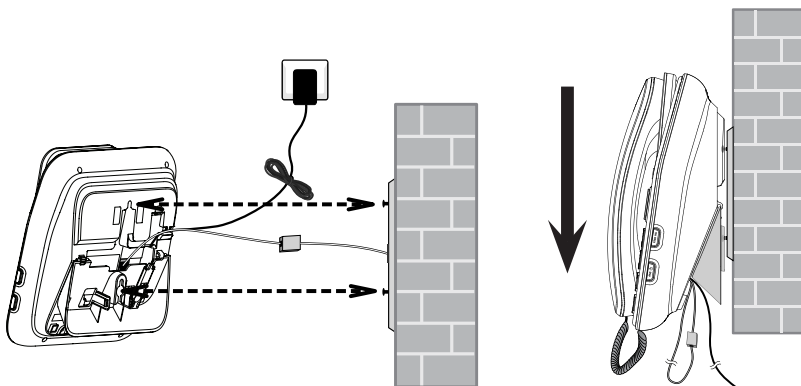

7. Hang de hoorn op de hoornhouder en pas de hoek van de display aan, zodat hij duidelijk te lezen is.

# Bedienungselementen

## Handset

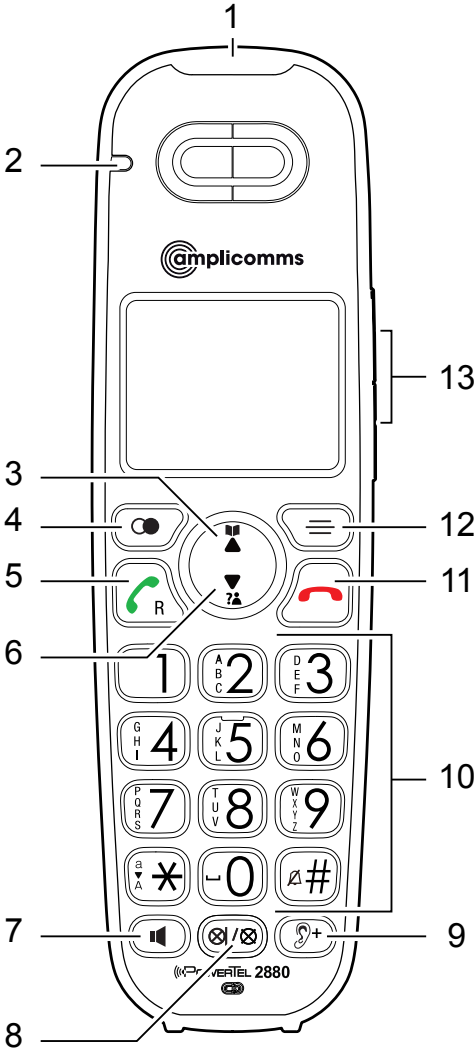

## 1 **Oproep**

- Knippert bij binnenkomende oproep of oproep vanuit tafeltoestel.

## 2 **Batterijstand**

- Brandt wanneer de handset wordt opgeladen.

## 3 **Telefoonboek/Omhoog**

- In ruststand: telefoonboek openen.
- In menu/lijsten: omhoog bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts verschuiven.

## 4 **Nummerherhaling/Pauze**

- In ruststand: nummerherhaling openen/door lijst bladeren door herhaaldelijk te drukken
- Tijdens invoeren van telefoonnummer: ingedrukt houden voegt kiespauze toe.

## 5 **Bel-toets/R-toets**

- Bellen of oproep beantwoorden.
- Tijdens een gesprek: flashfunctie voor gebruik van functies van telefoonnet.

## 6 **Oproeplijst/Omlaag**

- In ruststand: oproeplijst openen.
- In menu/lijsten: omlaag bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links bewegen.

## 7 **Luidspreker**

- Handsfree bellen of oproep beantwoorden.
- Tijdens een gesprek: luidspreker aan/uit-schakelen.

## 8 **Geluidsdemping/Wissen**

- Tijdens een gesprek: microfoon uitschakelen
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
- Individuele gegevens in lijsten wissen (oproeplijst/nummerherhaling/telefoonboek/herinneringen).

## 9 **Audio-hulp**

- Tijdens een gesprek: verbeteren van de klank en verhoging van volume.

## 10 **Toetsenblok**

- Invoeren van cijfers of letters
- Met om het even welke toets een binnenkomende oproep aannemen.
- **Ster-toets** bij het invoeren van namen: schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- **Hekjes-toets** in ruststand: ingedrukt houden om de nachtmodus in/uit te schakelen.

## 11 **Opleggen/annuleren**

- Tijdens een gesprek: opleggen.
- In het menu: selectie annuleren/terug naar vorige menu/ingedrukt houden om terug naar ruststand te gaan.
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
- In ruststand: ingedrukt houden om gemiste oproepen te wissen.

## 12 **Menu/selectie**


- In ruststand: menu openen.
- In het menu: menupunt selecteren of opslaan.

## 13 **Volumetoetsen**

- In ruststand: rinkelvolume instellen.
- Tijdens een gesprek/afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.



# Tafeltoestel

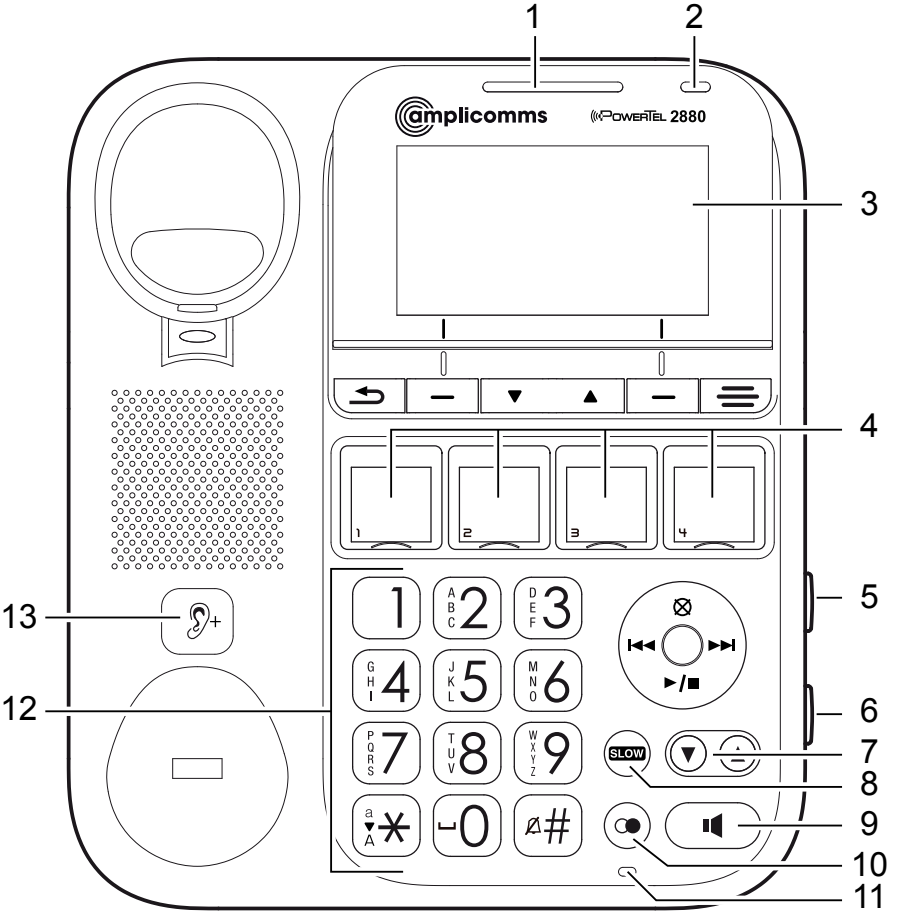

## 1 Oproep

- Knippert bij oproep.

## 2 Weergave "Bezet"

- Brandt bij oproep, gesprek of aannemen van gesprek door antwoordapparaat.

- Brandt wanneer een handset aangemeld is.
- Knippert wanneer een handset afgemeld wordt.
- Knippert wanneer de lijn bezet is door een ander toestel (handset).

### 3 **Display**

- De display kan omhoog of omlaag geklapt worden om hem beter te kunnen lezen.

### 4 **Snelkiestoetsen**

- In ruststand: indrukken om een telefoonnummer onder de toets op te slaan of te bellen.

### 5 **Bel-toets**

- In ruststand: indrukken om alle aangemelde handsets te bellen.

### 6 **Antwoordapparaat aan/uit**

- Indrukken om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen. Brandt wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is.

### 7 **Volumetoetsen**

- In ruststand: rinkelvolume instellen.
- Tijdens een gesprek/afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.

### 8 **Slow-toets**

- Vertraagt de weergave bij het beluisteren van het antwoordapparaat of van de herinneringen.

### 9 **Luidspreker-toets**

- Handsfree bellen, een oproep aannemen of een gesprek beëindigen.
- Tijdens een gesprek: luidspreker aan/uit-schakelen.

### 10 **Nummerherhaling/Pauze**

- In ruststand: nummerherhaling openen/door lijst bladeren door herhaaldelijk te drukken
- Tijdens invoeren van telefoonnummer: ingedrukt houden voegt een kiespauze toe.


## 11 Microfoon

## 12 Toetsenblok

- Invoeren van cijfers of letters
- Met om het even welke toets een binnenkomende oproep aannemen.
- **Sterretjes-toets** bij het invoeren van namen: schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- **Hekjes-toets** in ruststand: ingedrukt houden om de nachtmodus in/uit te schakelen.

## 13 Audio-hulp

- Tijdens een gesprek: verbeteren van de klank en verhoging van volume.

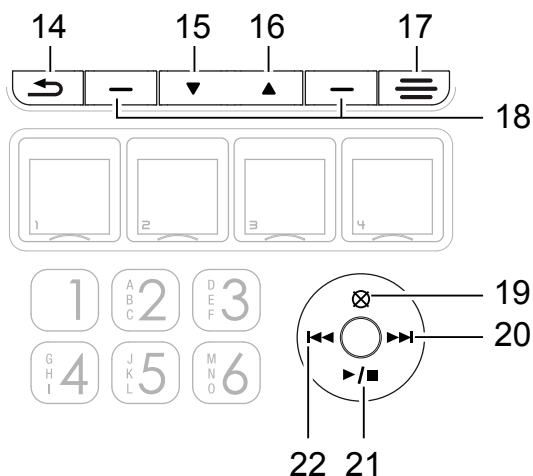

## 14 Annuleren

- In het menu: selectie annuleren/terug naar vorige menu/ingedrukt houden om terug naar ruststand te gaan.
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).

- In ruststand: ingedrukt houden om gemiste oproepen te wissen.

## 15 **Omlaag**

- In menu/lijsten: omlaag bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links bewegen.

## 16 **Omhoog**

- In menu/lijsten: omhoog bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts verschuiven.

## 17 **Menu-toets**

- In ruststand: menu openen.

## 18 **Linker-schermttoets/rechter-schermttoets**

- Selecteren van de opties die boven de knop vermeld zijn.

## 19 **Wissen-toets**

- Wissen van het afgespeelde antwoordapparaatbericht, het welkomstbericht of de herinnering.
- Individuele gegevens in lijsten wissen (oproeplijst/nummerherhaling/telefoonboek/herinneringen).

## 20 **Verder-toets**

- Verdergaan naar volgende bericht bij het afspelen van het antwoordapparaat.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts verschuiven.










## 21 **Starten/stoppen-toets**

- Het afspelen van het antwoordapparaat starten/stoppen.
- Knippert bij nieuwe berichten/memo's op het antwoordapparaat.

## 22 **Terug-toets**

- Momenteel afgespeeld bericht van antwoordapparaat herhalen.
- Tweemaal indrukken om het vorige bericht af te spelen.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links bewegen.







# Symbolen in de display

-  Batterij bijna leeg: batterij moet worden geladen (handset).
-  Batterij vol (handset).
-  Batterij ongeveer 2/3 vol (handset).
-  Batterij ongeveer 1/3 vol (handset).
-  De handsfree-modus is ingeschakeld (handset).
-  Beltoon uitgeschakeld (handset/tafeltoestel).
-  Nieuw bericht op antwoordapparaat (handset/afhankelijk van de telefoonmaatschappij).
-  Nieuw bericht op antwoordapparaat (tafeltoestel/afhankelijk van de telefoonmaatschappij).
- MUTE** Microfoon uitgeschakeld (handset/tafeltoestel).
- NEW** Nieuw nummer in oproeplijst (handset/tafeltoestel).
- ANS ON** Antwoordapparaat ingeschakeld (handset/tafeltoestel).
-  Nieuwe berichten op het antwoordapparaat (handset/tafeltoestel).

# Door het menu navigeren

In dit hoofdstuk leest u hoe u de functies van de beide telefoons via het menu kunt inschakelen.

## Hoofdmenu openen (handset)

1. Druk op .
2. Selecteer met  en  het gewenste menupunt en druk op .
3. Druk op  om de actie te annuleren, terug naar het vorige menupunt te gaan of het menu te verlaten.
4. Houd  ingedrukt om terug in de ruststand te schakelen.

**Opmerking:** Wanneer u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch terug in ruststand.

## Menuoverzicht (handset)

Berchtn afspln

Antwoordapp

Boodschap

Alle wissen

Memo opnemen

Antwrd AAN/UIT

Antw app

Intercom

Telefoonboek

Controleren

Contact toevgn

Oproeplijst

Controleren

Oproepen wissn

Memo

Controleren

Memo instellen

Aan/uit

Beltonen	Toonvolume
	Beltoon
Toon	Toetsgeluid
	Batterij leeg
	Buiten bereik
Datum/tijd	
Tijdsformaat	
Datumformaat	
Instellingen	Displaytaal
	Taal v. stem
	Voicemail wissn
	Handset bewrkn
	CID tijdsynchr
	Belmodus
	Flashtijd
Reset	

## Hoofdmenu openen (tafeltoestel)

1. Druk op .
2. Selecteer met  het gewenste menupunt en druk op **SELECT**.
3. Druk op  om de actie te annuleren, terug naar het vorige menupunt te gaan of het menu te verlaten.
4. Houd  ingedrukt om terug in de ruststand te schakelen.

**Opmerking:** Wanneer u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch terug in ruststand.

# Menuoverzicht (tafeltoestel)

Antwoordapparaat	Boodschap Alle wissen Memo opnemen Antwoord AAN/UIT Antw app instelln
Intercom	
Fotosneltoets	
Telefoonboek	Controleren Contact toevoegen
Oproeplijst	Controleren Alle oprpn wissen
Memo	Memo lezen Memo instellen Memo aan/uit
Beltonen	Toonvolume Beltoon
Toetsgeluid	
Datum/tijd	
Tijdsformaat	
Datumformaat	
Instellingen	Displaytaal Taal v. stem Voicemail wissn Basis bewerken CID tijdsynchr Belmodus Flashtijd Registratie
Reset	




# Eerste inbedrijfname






Fabrieksmatig is de menutaal ingesteld op **ENGELS**.

1. In de display van het tafeltoestel verschijnt **SET DATE/TIME**.
2. Voer de datum in (dag/maand/jaar) en druk op **NEXT**.
3. Voer de tijd in (uren/minuten) en druk op **SAVE**.

## De taal instellen op het tafeltoestel

1. Druk op  .
2. Selecteer **Settings** en druk op **SELECT**.
3. Druk op **SELECT** om **LCD language** te selecteren.
4. Selecteer een taal en druk op **SELECT**.
5. Druk op **YES** om uw selectie te bevestigen.


## De taal instellen op de handset

1. Druk op  .
2. Selecteer **Settings** en druk op  .
3. Druk op  om **LCD language** te selecteren.
4. Selecteer een taal en druk op  .
5. Druk op  om uw selectie te bevestigen.

# Telefoneren

## Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen

### Via tafeltoestel bellen

Voer het telefoonnummer in en hef de hoorn op, of druk op  .

- ofwel -


Hef de hoorn op of druk op  . Wacht op de kiestoon en voer het telefoonnummer in.

### Gesprek aannemen via tafeltoestel



Hef de hoorn op of druk op  of druk op om het even welke cijfertoets.

### Gesprek beëindigen via tafeltoestel



Wanneer u via de hoorn hebt getelefoneerd, leg dan de hoorn op.

Wanneer u via de luidspreker hebt getelefoneerd, druk dan op  .

### Bellen via de handset

Voer het telefoonnummer in en druk op  of  .


- ofwel -

Druk op  of  . Wacht op de kiestoon en voer het telefoonnummer in.



### Gesprek aannemen via handset

Druk op  of  of druk op om het even welke cijfertoets.

### Gesprek beëindigen via handset



Druk op  of zet de handset in het laadstation.

## Handsfree bellen

Druk tijdens een gesprek op de toets  op het tafeltoestel of  op de handset. Om de handsfree-modus uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

## Audio-hulp







Deze functie verbetert de klank en verhoogt het volume in de hoorn. Druk tijdens een gesprek op het tafeltoestel op de toets  of op de handset op .

**VOORZICHTIG: het volume is erg hoog!**

Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

## Equalizer

Met deze functie kunt u de klankkwaliteit van de hoorn en luidspreker veranderen.

1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets  of .
2. Druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset  om de opties te zien.
3. Selecteer **Natuurlijk**, **Hoog 1**, **Hoog 2** of **Laag** en druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op , om te instelling op te slaan.

## Volume instellen

### Via de handset

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen op de zijkant van het toestel.



### Via het tafeltoestel

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen  .

## Microfoon uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u tijdelijk niet meer kan horen.

### Via de handset

Druk tijdens een gesprek op . Om de microfoon opnieuw in te schakelen, druk u nogmaals op .


### Via het tafeltoestel

Druk tijdens een gesprek op **GEDEMPT**. Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u op **VOLUME**.

## Beltoon uitschakelen

U kunt de beltoon van een binnenkomende oproep uitschakelen, zodat dat de verbinding verbroken wordt. U kunt het gesprek gewoon aannemen zolang de beller niet heeft opgelegd. Bij de volgende binnenkomende oproep rinkelt de telefoon opnieuw normaal.

### Via de handset

Druk op .

### Via het tafeltoestel

Druk op **STIL** of .

## Nummerherhaling

Uw telefoon slaat de 10 laatst gekozen telefoonnummers op in een lijst.

### Via de handset

1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  en  of door herhaaldelijk te drukken op  het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op  of  om het nummer te bellen.

## Via het tafeltoestel

1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  of door herhaaldelijk te drukken op  het gewenste telefoonnummer.
3. Hef de hoorn op of druk op  om het nummer te bellen.



## Oproeplijst

**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw telefoonmaatschappij de service CLIP (Calling Line Identification Presentation: belleridentificatie) ingeschakeld heeft. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij. De telefoonnummers van binnenkomende oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst. Bij nieuwe oproepen verschijnt een melding in de display.




## Terugbellen vanuit de oproeplijst op de handset

1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
3. Druk op  of  om het nummer te bellen.

## Terugbellen vanuit de oproeplijst op het tafeltoestel

1. Druk in ruststand op **OPROEPEN**.
2. Selecteer met  het gewenste nummer.
3. Hef de hoorn op of druk op  om het nummer te bellen.





## Een telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

1. Selecteer de oproeplijst en selecteer een nummer.
2. Druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .
3. Wijzig indien nodig het telefoonnummer en druk op het tafeltoestel op **VOLGNDE** of op de handset op .
4. Voer een naam in en druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .






## Opeenvolgende nummers kiezen

Gebruik deze functie om tijdens een gesprek een nummer uit het telefoonboek, de nummerherhaling of de oproeplijst te bellen.

### Nummer uit telefoonboek/oproeplijst

1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets  of .
2. Selecteer **Telefoonboek** of **Oproeplijst** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset .
3. Selecteer het gewenste nummer en druk op het tafelhoestel op **BELLEN** of op de handset op  om het nummer te bellen.

### Nummer uit nummerherhaling

1. Druk tijdens een gesprek op  of op .
2. Selecteer met de pijltoetsen of door herhaaldelijk te drukken op  of  het gewenste nummer en druk op het tafelhoestel op **BELLEN** of op de handset op  om het nummer te bellen.

## De handset bellen (oproepsignaal/paging)

U kunt een verloren handset zoeken of de gebruiker van een handset melden dat u hem/haar wilt spreken, door via het tafelhoestel een akoestisch signaal te activeren.

### Oproepsignaal activeren

Druk op de bel-toets op de rechterkant van het tafelhoestel om alle aangemelde handsets te bellen.

### Oproepsignaal stoppen

**Via het tafelhoestel:** Druk op **STOPPEN** of druk opnieuw op de beltoets.

**Via de handset:** Druk op  of  of op om het even welke cijfertoets, of zet de handset in het laadstation.

## Intern gesprek

U kunt een intern gesprek voeren tussen twee telefoons. Deze gesprekken zijn gratis.

1. Druk op de menutoets  of , selecteer **Intercom** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset . Als slechts 2 toestellen beschikbaar zijn, dan rinkelt onmiddellijk het andere toestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset .
2. Om het gesprek via het tafeltoestel aan te nemen, heft u de hoorn af of drukt u op  of op om het even welke cijfer-toets.  
- ofwel -  
Om het gesprek via een handset aan te nemen, drukt u op  of  of op om het even welke cijfertoets.

## Extern gesprek intern doorverbinden

U kunt een extern gesprek vanuit het tafeltoestel naar de handset of omgekeerd doorverbinden.



### Vanuit de handset naar het tafeltoestel

1. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Doorverbinden** en druk op . Als geen handset aangemeld is, dan rinkelt onmiddellijk het tafeltoestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op .
2. Om het gesprek via het tafeltoestel aan te nemen, heft u de hoorn af of drukt u op  of op om het even welke cijfer-toets.  
- ofwel -  
Om het gesprek via een andere handset aan te nemen, drukt u op  of  of op om het even welke cijfertoets.

## Vanuit het tafeltoestel naar de handset

1. Druk tijdens een gesprek op  , selecteer **Doorverbinden** en druk op **SELECT**.

Als slechts één handset aangemeld is, begint deze onmiddellijk te rinkelen. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op **SELECT**.

2. Om het gesprek via de handset op te nemen, drukt u op  of  of op om het even welke cijfertoets.

## Conferentie

U kunt een conferentie instellen met het tafeltoestel, de handset en een externe gesprekspartner.










1. Je voert een extern gesprek.
2. Druk op de menutoets  of  , selecteer **Intercom** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset  .  
Als slechts 2 toestellen beschikbaar zijn, dan rinkelt onmiddellijk het andere toestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset  .
3. Als het interne gesprek is aangenomen, drukt u op  of  .
4. Selecteer **Gedeeld gesprek** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset  .  
De conferentie is opgezet.




# Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u tot 100 telefoonnummers opslaan die voor alle toestellen beschikbaar zijn. Om het nummer in het telefoonboek te vinden, voert u de eerste letters van de opgeslagen naam in met behulp van de cijfertoetsen. Selecteer met de pijltoetsen het gewenste nummer.

## Een contact opslagen in het telefoonboek

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Telefoonboek** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Contact toevoegen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Voer het telefoonnummer in  
- ofwel -  
Markeer een nummer uit de nummerherhaling. Druk op  of , selecteer het gewenste nummer en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
5. Druk op het tafelhoestel op **VOLGNDE** of op de handset op .
6. Voer een naam in en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Nummer uit telefoonboek gebruiken

Open het telefoonboek (tafelhoestel: **TELEFOONB**, handset: ) en selecteer het gewenste nummer.

### Bellen

**Tafelhoestel:** Hef de hoorn op of druk op .

**Handset:** Druk op  of .

## Bewerken

Druk op het tafeltoestel op **BEWERK** of op de handset op . Bewerk de gegevens en druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .


## Wissen

Druk op het tafeltoestel op  of op de handset op . Antwoord bevestigend op de controlevraag


# Fotosneltoetsen

Het tafeltoestel beschikt over 4 fotosneltoetsen om nummers op te slaan die u vervolgens met slechts één druk op de knop kunt bellen. Op het deksel te openen, grijpt u met uw vingernagel in de gleuf aan de onderkant en klapt u het deksel open. U kunt er een foto van ongeveer 18 x 20 mm inleggen.


## Fotosneltoets opslaan


1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Fotosneltoets** en druk op **SELECT**.
3. Selecteer het gewenste toetsnummer en druk op **SELECT**.
4. Voer het telefoonnummer in en druk op **VOLGNDE**.
5. Voer de naam in en druk op **OPSLAAN**.

## Fotosneltoets bewerken

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Fotosneltoets** en druk op **SELECT**.
3. Selecteer het gewenste toetsnummer en druk op **SELECT**.
4. Bewerk het telefoonnummer en druk op **VOLGNDE**.
5. Bewerk de naam en druk op **OPSLAAN**.

## Fotosneltoets wissen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Fotosneltoets** en druk op **SELECT**.

3. Selecteer het gewenste toetsnummer en druk op . Antwoord bevestigend op de controlevraag.

## Fotosneltoets selecteren

Druk in ruststand op de gewenste fotosneltoets. De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt onmiddellijk gebeld.

## Herinneringsberichten



Met deze functie kunt u op het antwoordapparaat een bericht inspreken als geheugensteuntje voor belangrijke zaken. Herinneringsberichten kunnen eenmalig zijn, maar ook dagelijks, wekelijks of maandelijks herhaald worden.

U kunt tot 9 herinneringsberichten opslaan. Een herinneringsbericht mag maximaal 4 minuten lang zijn. De totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat voor berichten en herinneringsberichten bedraagt ongeveer 30 minuten.


Als u een herinneringsbericht ingesproken hebt, attenderen zowel het tafeltoestel als de handset u op de ingevoerde tijd op deze herinnering met behulp van een akoestisch signaal en een melding in de display.

Speel het herinneringsbericht altijd tot het einde af. Daarna schakelt de telefoon opnieuw in ruststand.

### Een herinneringsbericht via de handset afspelen

Wanneer u het akoestische signaal hoort, drukt u op  of .

### Een herinneringsbericht via het tafeltoestel afspelen


Wanneer u het akoestische signaal hoort, heft u de hoorn op of drukt u op .

## Een herinneringsbericht toevoegen



1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Memo** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Memo instellen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Voer de dag, de maand en het jaar voor het herinneringsbericht in en druk op het tafelhoestel op **VOLGNDE** of op de handset op .
5. Voer de tijd in en druk op het tafelhoestel op **VOLGNDE** of op de handset op .
6. Spreek na het signaal uw herinneringsbericht via de microfoon in. Beëindig de opname via het tafelhoestel met **OPSLAAN** of via de handset met **toets 5**.
7. Selecteer de gewenste frequentie en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Herinneringsbericht controleren

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Memo** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Controleren** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. De herinneringsberichten worden na elkaar afgespeeld. Met toets  op het tafelhoestel of **toets 6** op de handset springt u naar het volgende herinneringsbericht. Druk op  op het

tafeltoestel of op **toets 4** op de handset om het huidige herinneringsbericht opnieuw te horen. Druk **tweemaal** op  op het tafeltoestel of op **toets 4** op de handset om het vorige herinneringsbericht opnieuw te horen.

## Een herinneringsbericht wissen


1. Druk tijdens het afspelen van het herinneringsbericht op het tafeltoestel op  of op de handset op .

## Instellingen






### Beltonen

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Beltonen** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Toonvolume** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op . Stel het gewenste volume in en druk op het tafeltoestel op **OK** of op de handset op .  
- ofwel -  
Selecteer **Beltoon** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op . Selecteer een melodie en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op .

### De toetstoon op het tafeltoestel

1. Druk in ruststand op de menu-toets .
2. Selecteer **Toetsgeluid** en druk op **SELECT**.
3. Stel het gewenste volume in en druk op **OK**.

## Tonen op de handset





1. Druk in ruststand op de menu-toets .
2. Selecteer **Toon** en druk op .
  - **Toetsgeluid:** Stel het gewenste volume in en druk op .
  - **Batterij leeg:** Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een bijna lege batterij, aan of uit en druk op .
  - **Buiten bereik:** Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een te grote afstand tot het basisstation, aan of uit en druk op .

## Datum/tijd instellen


Bij de nummers in de oproeplijst en de berichten van het antwoordapparaat worden de datum en tijd aangegeven. Ook voor een correcte werking van de herinneringsberichten is het belangrijk om de datum en tijd correct in te stellen.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Datum/tijd** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Voer de dag, de maand en het jaarin en druk op het tafelhoestel op **VOLGNDE** of op de handset op .
4. Voer het uur en de minuten in en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Tijdsformaat instellen

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Tijdsformaat** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **12 U** oder **24 U** en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Datumformaat instellen

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Datumformaat** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **MM/DD/JJ** of **DD/MM/JJ** en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .





## Displaytaal instellen

Met deze instelling legt u vast in welke taal de displaygegevens (het menu) moet verschijnen.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Displaytaal** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Selecteer de gewenste taal en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .
5. Beantwoord de controlevraag op het tafelhoestel met **JA** of op de handset met .

## De taal voor de standaard begroeting instellen

Met deze instelling legt u vast in welke taal de standaard begroeting van het antwoordapparaat moeten zijn (Duits en Engels).

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Taal v. stem** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .

4. Selecteer de gewenste taal voor de instructies van het antwoordapparaat en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## MWI wissen

MWI staat voor "Message Waiting Indication" en betekent dat een signaal aangeeft dat er een nieuw bericht aangekomen is in de voicemail die uw telefoonmaatschappij mogelijk ter beschikking stelt. Via de hier beschreven procedures kunt u dit signaal in de display wissen, zonder dat het bericht zelf gewist wordt. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.


1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Voicemail wissen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Beantwoord de controlevraag op het tafelhoestel met **JA** of op de handset met .

## De naam van het toestel wijzigen

U kunt de namen van het tafelhoestel en van de handset wijzigen.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Basis bewerken** (tafelhoestel) of **Handset bewrkn** (handset) en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Wis de oude naam met **TERUG** (tafelhoestel) of  (handset) en voer een nieuwe naam in.



5. Druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op  .

## CID-tijdssynchronisatie

Als u een tijdssynchronisatie van uw telefoonmaatschappij ontvangt, dan worden bij binnenkomende oproepen de datum en tijd automatisch ingesteld. U kunt deze tijdssynchronisatie in- of uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op  .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
3. Selecteer **CID tijdsynchr** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op  .

## Kiesmethode instellen

De gebruikelijke kiesmethode op analoge telefooncentrale is "toonkiezen". Bij gebruik van oudere telefooncentrales moet de kiesmethode "Impulskiezen" worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw telefooncentrale.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op  .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
3. Selecteer **Belmodus** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
4. Selecteer **Toon** of **Puls** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .

## Flashtijd instellen

Voor het gebruik van bepaalde functies van het telefoonnet is een zogenaamd flash-signaal met een bepaalde lengte vereist. Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare functies van uw telefoonnet en over de benodigde flashtijd.

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Flashtijd** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Selecteer **Kort, Standaard** of **Lang** en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Extra handsets registreren (tafelhoestel)

U kunt tot 4 handsets koppelen aan het tafelhoestel.

Nieuw gekochte handsets (PowerTel 2701, als accessoire beschikbaar) moeten op het tafelhoestel worden geregistreerd voordat ze in gebruik worden genomen.

### Een nieuwe PowerTel 2701 registreren:

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **SELECT**.
3. Selecteer **Registratie** en druk op **SELECT**.
4. Zet de nieuwe handset in het laadstation.



## De fabrieksinstellingen opnieuw instellen



1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Reset** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Beantwoord de controlevraag op het tafelhoestel met **SELECT** of op de handset met .

## Nachtmodus

U kunt de "nachtmodus" instellen voor een bepaalde duur (1-12 uur). Tijdens deze periode worden alle geluiden (behalve paging) en het meeluisteren van berichten op het antwoordapparaat, uitgeschakeld.

Wanneer u de nachtmodus inschakelt, wordt automatisch het antwoordapparaat ingeschakeld. Nadat de ingestelde duur van de nachtmodus afgelopen is, blijft het antwoordapparaat ingeschakeld.

1. Druk in ruststand op de **hekjes-toets**  of  en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2. Voer de gewenste duur in (1 - 12) en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .

Om de nachtmodus uit te schakelen, drukt u op de **hekjes-toets**  of  en houd u deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.

# Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat slaat tot 99 berichten op.

Een bericht mag maximaal 3 minuten lang zijn (instelbaar, zie hieronder). De totale opnametijd voor berichten, memo's en herinneringsberichten bedraagt ongeveer 30 minuten.

Om altijd voldoende capaciteit voor nieuwe berichten te hebben, raden we aan om beluisterde berichten te wissen. Als er geen plaats meer is voor nieuwe berichten, dan neemt het antwoordapparaat geen gesprekken meer aan.

Er is reeds fabrieksmatig een welkomstbericht beschikbaar gesteld (Duits en Engels) dat u door een persoonlijk bericht kunt vervangen, bv. "We zijn momenteel niet aanwezig. Laat een bericht achter na de pieptoon."

## Antwoordapparaat aan-/uitschakelen

### Via het tafeltoestel

Druk op de toets op de zijkant van het tafeltoestel.

- ofwel -

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op **SELECT**.
3. Selecteer **Antwoord AAN/UIT** en druk op **SELECT**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OPSLAAN**.

### Via de handset

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer e **Antwoordapp** en druk op .
3. Selecteer **Antwrld AAN/UIT** en druk op .
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op .

# Berichten beluisteren

## Via het tafeltoestel

Druk op .

Als zowel oude als nieuwe berichten beschikbaar zijn, dan kunt u kiezen of u de oude of de nieuwe berichten wilt beluisteren. Als alleen oude of alleen nieuwe berichten beschikbaar zijn, worden die direct afgespeeld.

Tijdens het beluisteren van een bericht kunt u:

- het volume instellen met ;
- naar het volgende bericht springen met ;
- teruggaan naar het begin van het huidige bericht met .  
Druk tweemaal op  om naar het vorige bericht te springen;
- het huidige bericht wissen met ;
- het afspelen stoppen of herstarten met ;
- de snelheid van het afspelen verminderen met ;
- de beller terugbellen door op **TERUGBLLN** te drukken. Beantwoord de controlevraag met **JA**.

## Via de handset

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Druk op  om **Berchtn afspln** te selecteren.

Als zowel oude als nieuwe berichten beschikbaar zijn, dan kunt u kiezen of u de oude of de nieuwe berichten wilt beluisteren. Als alleen oude of alleen nieuwe berichten beschikbaar zijn, worden die direct afgespeeld.

Tijdens het beluisteren van een bericht kunt u:


- het volume van het bericht instellen met de volumetoetsen op de zijkant;
- naar het volgende bericht springen met **toets 6**;

- teruggaan naar het begin van het huidige bericht met **toets 4**. Druk tweemaal op **toets 4** om naar het vorige bericht te gaan.
- het huidige bericht wissen met ;
- het bericht beluisteren via de hoorn of via de luidspreker met ;
- de klank in de hoorn verbeteren met ;
- de beller terugbellen met . Beantwoord de controlevraag met . Als u niet wilt bellen, druk dan op .





## Eigen begroeting opnemen

Uw eigen begroeting mag tot 90 seconden lang zijn. Begroetingen die korter dan 2 seconden zijn, worden niet opgeslagen.

### Via het tafeltoestel

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Druk op **SELECT** om **Antwoordapparaat** te selecteren.
3. Druk op **SELECT** om **Boodschap** te selecteren.
4. Druk op **SELECT** om **Nwe bdschp opnmn** te selecteren.
5. Spreek uw begroeting na de piepton in en druk op om te beëindigen op **OPSLAAN**.

### Via de handset

1. Druk in ruststand op de menutoet .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Druk op  om **Boodschap** te selecteren.
4. Druk op  om **Boodschp opnmn** te selecteren.
5. Spreek na de piepton uw begroeting en druk op **toets 5** om de opname te beëindigen.

# Meeluisteren



U kunt instellen of u de binnenkomende berichten via het tafeltoestel of via de handset wilt horen of niet wilt horen. De instelling geldt voor beide toestellen tegelijkertijd.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Antw app instelln** (tafeltoestel) of **Antw app** (handset) en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Selecteer **Meeluisteren** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op .
5. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .


## Via het tafeltoestel

Als het meeluisteren ingeschakeld is en het antwoordapparaat heeft een oproep aangenomen, dan hoort u zowel de begroeting als het bericht van de beller via de luidspreker.




U kunt ondertussen:

- het volume instellen met ;
- het meeluisteren tijdelijk uitschakelen met ;
- het geluid stilzetten met **STIL**;
- het meeluisteren tijdelijk inschakelen met **SCHERM** wanneer het algemeen uitgeschakeld is. schaltet ist.

## Via de handset

Als het meeluisteren ingeschakeld is en het antwoordapparaat heeft een oproep aangenomen, druk dan op  om zowel de begroeting als het bericht van de beller via de luidspreker te horen. U kunt ondertussen:


- het volume van de weergave instellen met de volumetoetsen (op de zijkant van de handset);

- het meeluisteren tijdelijk uitschakelen met  ;
- het meeluisteren tijdelijk inschakelen met  wanneer het algemeen uitgeschakeld is;
- het bericht beluisteren via de hoorn of via de luidspreker met  .

## Een oproep overnemen

Als het antwoordapparaat reeds een gesprek aangenomen heeft en u hoort het bericht van de beller, dan kunt u het gesprek overnemen.

### Via het tafeltoestel

Hef de hoorn op of druk op  .

### Via de handset

Druk op  of  .

## Berichten wissen

U kunt uitsluitende oude (beluisterde) berichten wissen.

1. Druk in ruststand op de menu-toets  of op  .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op  .
3. Selecteer **Alle wissen** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op  .
4. Beantwoord de controlevraag op het tafeltoestel met **JA** of op de handset met  .

## Memo opnemen

Een memo is een ter plekke opgenomen bericht dat u bv. kunt achterlaten voor andere personen die dit antwoordapparaat gebruiken. Memo's worden als nieuwe berichten aangegeven en behandeld en kunnen net als nieuwe berichten afgespeeld en gewist worden.



## Via het tafeltoestel

1. Druk in ruststand op de menutoets  .
2. Druk op **SELECT** om **Antwoordapparaat** te selecteren.
3. Selecteer **Memo opnemen** en druk op **SELECT**.
4. Spreek na de pieptoon uw bericht in en druk om te beëindigen op **OPSLAAN**.

## Via de handset

1. Druk in ruststand op de menutoets  .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op  .
3. Selecteer **Memo opnemen** en druk op  .
4. Spreek na de pieptoon uw bericht in en druk om te beëindigen op **toets 5**.

## Opnamevertraging instellen

U kunt instellen na hoeveel keer rinkelen (2, 4, 6, 8 of 10) het antwoordapparaat een oproep moet aannemen.

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op  .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op  .
3. Selecteer **Antw app instelln** (tafeltoestel) of **Antw app** (handset) en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op  .
4. Selecteer **Aant. beltoonen** en druk op het tafeltoestel op **SELECT** of op de handset op  .
5. Selecteer een waarde uit de lijst en druk op het tafeltoestel op **OPSLAAN** of op de handset op  .


## Pincode van antwoordapparaat instellen



Om de berichten op uw antwoordapparaat op afstand te beluisteren (vanuit om het even welke telefoon dat DTMF-signalen kan verzenden), is een pincode nodig. De standaard pincode is "00". U kunt om het even welk getal tussen "00" en "99" kiezen.

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Antw app instelln** (tafelhoestel) of **Antw app** (handset) en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
4. Selecteer **Pincode** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
5. Voer een pincode met 2 cijfers in en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op .

## Akoestisch signaal voor berichten

Als deze functie ingeschakeld is, geeft het tafelhoestel elke 10 seconden een pieptoon wanneer op het antwoordapparaat een nieuw bericht staat. Dit akoestische signaal wordt uitsluitend door het tafelhoestel gegeven. Drukt u op om even welke toets (behalve de beltoets (paging)), dan zal de pieptoon voor dit bericht uitschakelen. Bij het volgende bericht, hoort u de pieptoon opnieuw.

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .
3. Selecteer **Antw app instelln** (tafelhoestel) of **Antw app** (handset) en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op .

4. Selecteer **Berichtentoon** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
5. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op  .

## Opnametijd instellen

U kunt instellen hoe lang een bericht maximaal mag zijn (1, 2 of 3 minuten).

1. Druk in ruststand op de menutoets  of op  .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
3. Selecteer **Antw app instelln** (tafeltoestel) of **Antw app** (handset) en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
4. Selecteer **Opnametijd** en druk op het tafelhoestel op **SELECT** of op de handset op  .
5. Selecteer een waarde uit de lijst en druk op het tafelhoestel op **OPSLAAN** of op de handset op  .

# Het antwoordapparaat op afstand bedienen

Om uw antwoordapparaat vanuit een MFV-compatibele telefoon te kunnen bedienen, moet u een pincode van twee cijfers invoeren.

1. Bel uw telefoonnummer vanuit een MFV-compatibele telefoon.
2. Als het antwoordapparaat ingeschakeld is, dan wordt uw oproep na het ingestelde aantal rinkeltonen aangenomen. Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, dan wordt uw oproep na ongeveer 16 rinkeltonen aangenomen.
3. Voer de pincode van twee cijfers in. U hoort een bevestigingston.
4. Druk op de juiste knop voor de volgende opties:
  - **Toets 2** - alle berichten beluisteren
  - **Toets 4** - terug naar het vorige bericht (tijdens het afspelen)
  - **Toets 5** - bericht wissen (tijdens het afspelen)
  - **Toets 6** - het volgende bericht beluisteren (tijdens het afspelen)
  - **Toets 7** - antwoordapparaat aanschakelen
  - **Toets 9** - antwoordapparaat uitschakelen.

# Bijlage

## In geval van een storing

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website **www.amplicomms.com**

Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

**Sommige storingen zijn eenvoudig op te lossen door de telefoon uit te schakelen. Haal in dat geval de adapter van het basisstation (tafeltoestel) uit het wandstopcontact (verwijder ook de noodbatterijen), verwijder de batterijen van de handset en wacht ongeveer 20 minuten. Wanneer u daarna de adapter opnieuw aansluit en de batterijen opnieuw in het batterijvak legt, is de storing mogelijk opgelost.**

## Veiligheidsinstructies

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

## Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoge telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

# Installatieplek

Installeer de telefoon:

- op een droge, vlakke en vaste ondergrond;
- zo, dat niet over het snoer kan worden gestruikeld;
- op een afstand van minstens één meter van andere elektrische apparaten
- uit de buurt van rook, stof, trillingen, chemicalieën, vochtigheid, hitte en directe zonnestralen.

**Zorg ervoor dat de adapter op elk moment toegankelijk is.**

## Stroomvoorziening

**Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 2880 meegeleverde adapter.**

Wanneer u in het tafeltoestel noodbatterijen hebt gelegd, dan kunt u uw telefoon ook bij stroomuitval gebruiken. Houd er rekening mee dat u de noodbatterijen ongeveer elke 6 maanden moet vervangen om een correcte werking te garanderen.

## Energiezuinige adapter

De meegeleverde adapters voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn voor energieverbruikende producten (Richtlijn 2005/32/EG). Het energieverbruik is daarom zowel in bedrijfsmodus als in stand-by aanzienlijk lager dan bij oudere adaptermodellen.

## Medische apparaten

Gebruik uw telefoon niet:

- in de buurt van kritieke medische toestellen;
- tijdens een onweer.

Wanneer u een pacemaker draagt, dient u uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.

## Accu's/batterijen

Werp de batterijen nooit in vuur of water.

## Compatibiliteit met hoorapparaten

De telefoon is compatibel met de meeste in de handel beschikbare hoorapparaten. We kunnen echter niet garanderen dat deze telefoon volledig compatibel is met elk hoorapparaat.

## Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



## **Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!**

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terecht komen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om accu's en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat

u ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's en batterijen in te leveren bij winkels die batterijen verkopen of bij verzamelpunten die daartoe speciale containers beschikbaar stellen. De afvoer is kosteloos.

Lithiumbatterijen en accupacks van welke aard ook moeten in lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met tape, omdat anders risico op brand bestaat.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



## Technische gegevens

Standaard

Stroomvoorziening (tafeltoestel)

DECT

Opgenomen vermogen:

100-240V 50/60Hz

Uitgaand vermogen:

6 VDC 800 mA

Fabrikant en het model (UK-plug):

Chousen, CS6F060080FBF

Tenpao, S006MB0600080

Stroomvoorziening (laadstation)

Opgenomen vermogen:

100-240V 50/60Hz

Uitgaand vermogen:

6 VDC 450 mA

Fabrikant en het model (UK-plug):

Shenzen Rujing,

RJ-AS060450B001

VTech, VT04EUK06045



Reikwijdte	In de open lucht: ca. 300 m, Binnen: ca. 50 m
Stand-by	Max. tot 100 uur.
Gespreksduur	Tot 10 uur
Maximaal hoornvolume	+40dB
Akku	3 x AAA 1,2V 500mAh NiMH Fabrikant en het model: GPI , VT50AAAHC Corun, NI-MHAAAJ500
Kiesmodus	Toonkiezen (DTMF), impulskiezen
Flashtijd	Kort (100 ms), middellang (250 ms), lang (600 ms),
Optimale omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C
Optimale relatieve luchtvochtigheid	20% tot 80%

**Gebruik alleen de meegeleverde batterijen en de meegeleverde voedingen!**

## Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën

zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur. De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaanbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.



## Conformiteitsverklaring

Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn: 2014/53/EU.

De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.