



GEEMARC CL100

RINGLEIDING TELEFOON



Inhoud

1.	Inhoud Verpakking	3
2.	Wandmontage.....	3
3.	Geemarc CL 100.....	3
4.	Aansluiten van het toestel (zie figuur 2).....	5
5.	Instelling belsignaal.....	5
6.	Keuzeschakelaar kiestoon (toon/puls)	5
7.	Time break recall switch (300/100).....	5
8.	Inkomende gesprekken beantwoorden – zonder headset.....	6
9.	Toon-en volumeregeling	6
10.	Bellen	6
11.	Spreekvolume instellen.....	6
12.	Opnieuw kiezen laats gekozen nummer.....	7
13.	Mute toets.....	7
14.	Telefoonnummers opslaan	7
15.	Opgeslagen nummers kiezen	8
16.	Functie van toetsen 'recall', '*' en '#'	8

Geemarc CL 100

De CL100 telefoon is een robuust en tegelijkertijd modieus toestel speciaal ontworpen voor slechthorenden. In de hoorn van de telefoon is een ringleiding gebouwd zodat u via de T (coil/ringleiding)-stand het geluid versterkt in uw gehoorgang krijgt!

Als u deze telefoon in combinatie met een gehoorapparaat wenst te gebruiken, schakel dan uw gehoorapparaat op "T"!

Daarnaast is de CL 100 voorzien van een visueel waarschuwingssysteem door de standaard ingebouwde flitslamp. De flitslamp treedt in werking wanneer u wordt gebeld. Gebruikers die niet slechthorend zijn kunnen de telefoon natuurlijk op een normale manier gebruiken.

Wij wensen alle gebruikers veel plezier toe met gebruik van de CL100!

1. Inhoud Verpakking

De verpakking bevat de volgende 4 onderdelen:

1. Telefoonhoorn & -krulsnoer
2. Telefoontoestel (terminal)
3. Telefoonsnoer
4. Gebruiksaanwijzing


2. Wandmontage

Om uw toestel aan de wand te monteren gaat u als volgt te werk. Schuif de klem (5) naar buiten, draai hem om en plaats de klem weer terug. (Deze handeling zorgt er voor dat de hoorn goed op zijn plaats blijft wanneer het toestel verticaal aan de wand is gemonteerd.) Boor vervolgens twee gaten in de wand 80mm uit elkaar, steek pluggen in de geboorde gaten en draai vervolgens schroeven erin. Laat de schroeven 6 tot 7 mm uitsteken. Plaats het toestel over de schroefkoppen en schuif het toestel omlaag tot het niet verder kan. Het toestel is nu gemonteerd.


3. Geemarc CL 100

- (4) Toonregeling
- (5) Klem voor wandbevestiging
- (7) Volumeregeling telefoonhoorn
- (8) Luidspreker
- (9) Herhaaltoets laatste nummer
- (10) Niet van toepassing (alleen op een digitaal toestel)
- (11) Flitslamp inkomend gesprek
- (12) Geheugentoets
- (13) Mute-toets
- (16) Geheugentoetsen voor direct bellen
- (18) Regeling geluidsterkte belsignaal
- (19) Regeling spreekvolume
- (20) Toets voor activeren toon- en volumeregeling
- (21) 3 voorkeursoetsen alarmnummers
- (22) Aansluiting telefoonkabel
- (24) Automatische activering toon- en volumeregeling

Figuur 1

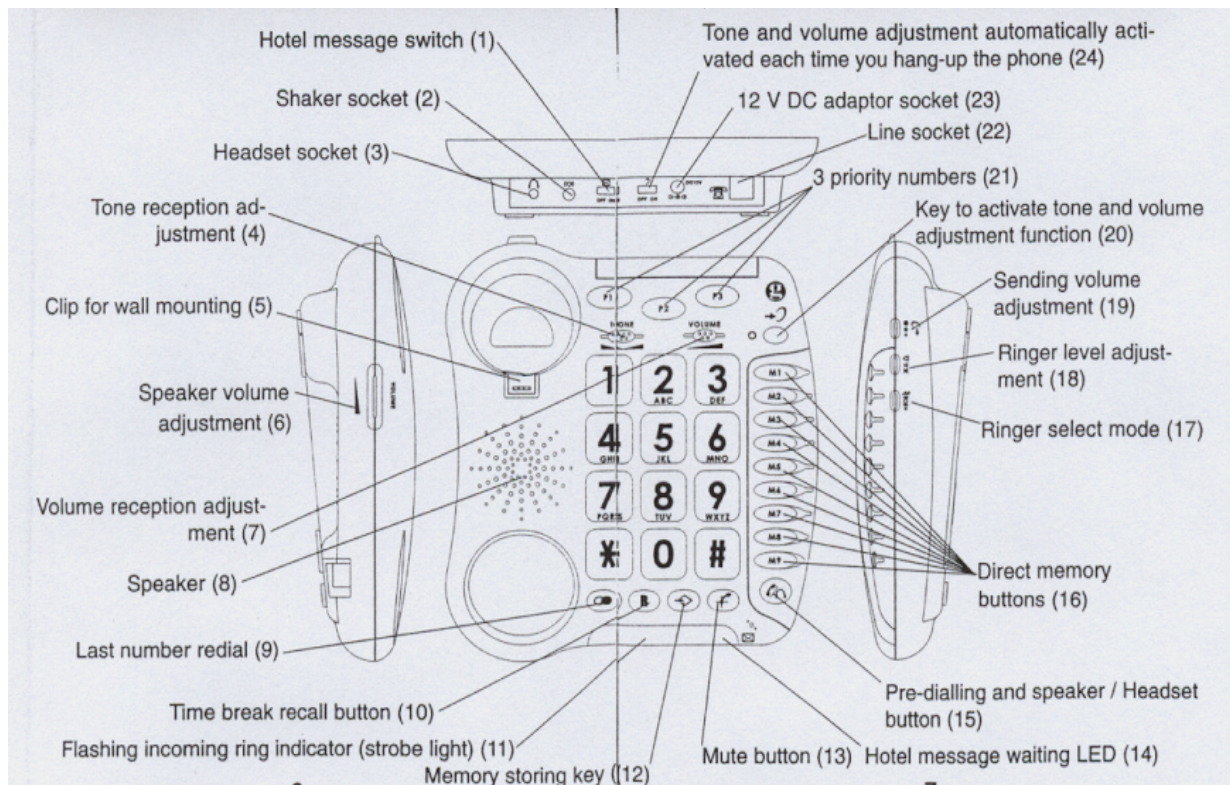

Figuur 2

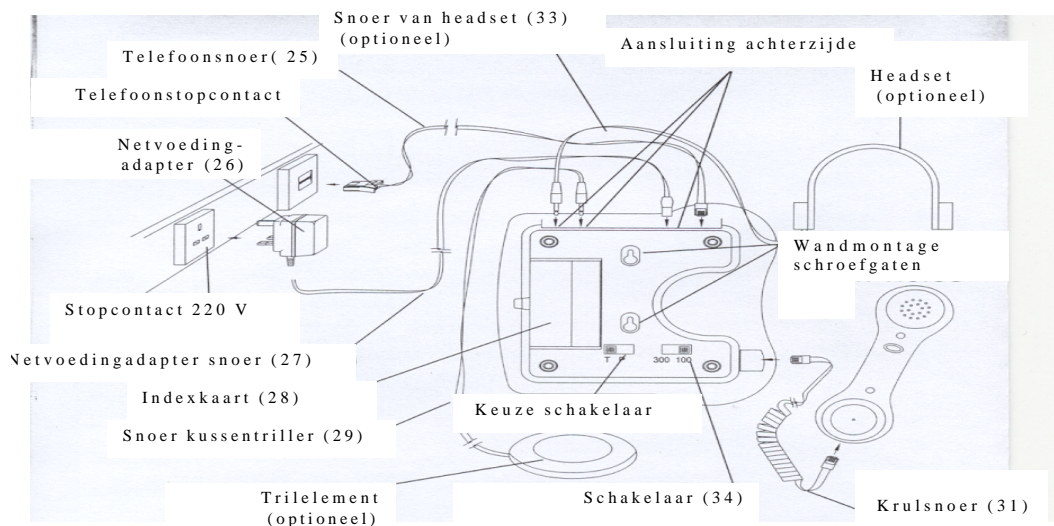

4. Aansluiten van het toestel (zie figuur 2)

- 1) Sluit telefoon krulsnoer (31) aan op het toestel.
- 2) Sluit het telefoonsnoer (25) aan op het toestel.
- 3) Sluit het snoer van de triller (29) aan (optioneel).
- 4) Sluit het snoer van de headset (33) aan (optioneel).
- 5) Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

Het toestel is nu klaar voor gebruik.


5. Instelling belsignaal

Met schakelaar (18) aan de rechterzijde van het toestel kunt u het belsignaal (volume) instellen op HI, LOW of OFF.



Bij aflevering van uw toestel is het belsignaal (volume) ingeschakeld op HI (high) en de beltoon op 6.

	Laag	Middel	Hoog
Beltoon 1	1	2	3
Beltoon 2	4	5	6 (standaardinstelling)
Beltoon 3	7	8	9

- Als u een andere beltoon wenst, kunt u die selecteren door de instellingen als volgt te wijzigen:
- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op 
- Druk op toets #.
- Druk op een van de cijfertoetsen 1 t/m 9.

Bij het volgende inkomende gesprek is de beltoon gewijzigd.

6. Keuzeschakelaar kiestoon (toon/puls)

In de fabriek is de keuzeschakelaar voor toon of puls (30) ingesteld op TONE (T). Als u niet kunt bellen met uw toestel is deze waarschijnlijk nog aangesloten op een oudere (privé)-centrale (PBX). In dat geval dient u de keuzeschakelaar op PULSE (P) te zetten.

7. Time break recall switch (300/100)

Voor het Verenigd Koninkrijk is de TBR-schakelaar (34) in de fabriek ingesteld op 100ms ten behoeve van (huis)centrales. Voor andere locaties of PBX-centrales kan de schakelaar op 300ms worden gezet.



Gebruik van de telefoon

8. Inkomende gesprekken beantwoorden – zonder headset


Bij een inkomend gesprek klinkt het geluidssignaal. Beantwoord het gesprek door de hoorn van de haak te nemen. Plaats na beëindiging van het gesprek de hoorn terug op de haak.

9. Toon-en volumeregeling

U kunt het volume en de toon van de luidspreker en de hoornluidspreker aan uw wensen aanpassen.

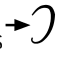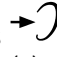Met toets  activeert u extra mogelijkheden voor toon- en volumeregeling tijdens het voeren van een gesprek. Het rode indicatielampje naast de toets  brandt als deze functie is geactiveerd. Verplaats de schuifregelaars voor toon (4) en volume (7) tot het gewenste geluid is bereikt.

Figuur 3

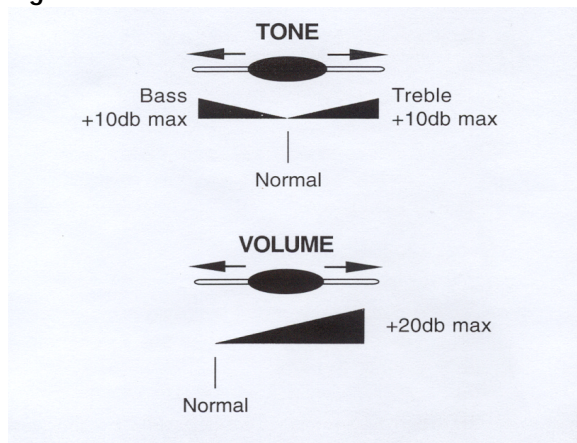

Opmerking

Met schakelaar  aan de achterzijde van het toestel in stand ON, worden de extra mogelijkheden voor toon- en volumeregeling automatisch geactiveerd telkens wanneer u de telefoon gebruikt. Met deze schakelaar in stand OFF dient u de functie handmatig te activeren door op toets  rechtsboven op uw toestel te drukken.


10. Bellen

- Neem de hoorn van de haak.
- Wacht op de kiestoon en toets het gewenste nummer.
- Plaats na beëindiging van het gesprek de hoorn correct op de haak terug.

11. Spreekvolume instellen

Als u een zachte stem heeft of als de door u gebelde personen u moeilijk kunnen verstaan, dan kunt u het spreekvolume verhogen door keuzeschakelaar (19) aan de zijkant van uw toestel op een andere stand te zetten (hoger of lager).

Figuur 4

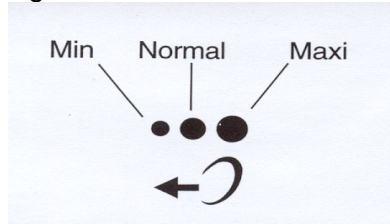

12. Opnieuw kiezen laats gekozen nummer

- Neem de hoorn van de haak.
- Wacht op de kiestoon en druk op de herhaaltoets
- Het nummer dat u als laatste heeft gebeld, wordt automatisch opnieuw gedraaid. (Let op: Geldt niet voor nummers die zijn vastgelegd in het geheugen.)

13. Mute toets

Houd de mute-toets ingedrukt als u liever niet heeft dat degene met wie u belt uw stem voor enkele ogenblikken kan horen. U hoort zelf wel de stem van de degene met wie u belt. Laat de mute-toets los om het gesprek te hervatten.

14. Telefoonnummers opslaan

In uw toestel kunt u maximaal 12 telefoonnummers voor direct kiezen opslaan, waaronder 3 voorkeurnummers (maximaal 21 karakters per nummer).

Met de 3 voorkeurtoetsen **P1**, **P2**, en **P3** (21), kunt u de drie voor u belangrijkste nummers opslaan, bijvoorbeeld:

- politie
- huisarts
- familieid

Wij adviseren u deze nummers direct bij installatie van het toestel vast te leggen!

Om een nummer vast te leggen gaat u als volgt te werk:

- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op toets
- Druk op één van de toetsen **M1** tot en met **M9** (16) of op één van de drie voorkeurnummers (21).
- Toets het nummer in.
- Druk nogmaals op toets

15. Opgeslagen nummers kiezen

- Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
- Druk op de toets voor het gewenste nummer: **M1** tot en met **M9** (16) of **P1**, **P2** of **P3** (21).
- Het opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.

16. Functie van toetsen 'recall', '*' en '#'

Deze toetsen worden gebruikt voor (nieuwe) digitale diensten, bijvoorbeeld voicemail. Neem voor meer gegevens contact op met uw netwerkbeheerder.