



GEBRUIKERSHANDLEIDING

!!! Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een bijgewerkte gebruikershandleiding, aangezien er belangrijke updates en wijzigingen kunnen zijn waar u op de hoogte van moet zijn !!!

Wat zit er in de doos

- Wake & Shake Light • Voedingsadapter • Deze handleiding • 1 Shaker

Tekens en symbolen

De volgende symbolen verschijnen in de gebruiksaanwijzing en op het batterijdeksel.

- WAARSCHUWING** : Waarschuwing voor het risico op letsel of schade aan de gezondheid.
- BELANGRIJK** : Veiligheidsopmerking die mogelijke schade aan het apparaat of de accessoires aangeeft.
- OPMERKING** : Opmerking over belangrijke informatie.

1. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voedingsadapter en de op de voedingsadapter gespecificeerde netspanning.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en ontkoppel het van het stopcontact bij defecten of storingen.
- Trek nooit aan de netkabel of het apparaat om de voedingsadapter los te koppelen van het stopcontact.
- Steek de voedingsadapter nooit in of trek deze nooit uit met natte handen.
- Draag of houd het apparaat nooit vast aan de netkabel.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Leg de netkabel zodanig dat niemand erover kan struikelen.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van vocht.

2. Bedoeld gebruik

De Wake-up Light wekt u op een zachte en natuurlijke manier. Het LED-licht wordt geleidelijk feller zoals een opkomende zon, waardoor uw ogen langzaam kunnen wennen aan de lichtomstandigheden en uw lichaam zich zachtjes kan voorbereiden op het ontwaken. De lichtintensiteit kan worden ingesteld naar uw persoonlijke voorkeuren. Naast de gesimuleerde zonsopgang kunt u een akoestisch alarm instellen om u te helpen wakker te worden. U kunt kiezen tussen de radio, een pieptoon, vijf natuurgeluiden of de shakertrillingen. De Wake-up Light zorgt voor een uitgeruste en aangename start van uw dag.

3. Apparaatfuncties:

- Klokweergave
- Wekfunctie met gesimuleerde zonsopgangen en alarm
- Twee alarmselecties met gesimuleerde zonsopgang
- Radio
- 5 natuurgeluiden
- Shakertrillingen
- Goodnight functie
- LED-licht ook werkzaam als lamp
- Sfeerverlichtingsfunctie
- USB-oplader voor smartphone
- MP3-ingang

WAARSCHUWING


- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik zoals beschreven in de handleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

4. Eerste gebruik


- Verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of alle vermelde onderdelen aanwezig zijn.
- Controleer de netstekker en kabel van het apparaat op schade.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.
- Positioneer het apparaat ongeveer 40 cm van uw hoofd.
- Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van het apparaat en plaats de 4 x AA-batterijen volgens het batterijsymbool. De batterij voorziet het apparaat van stroom in geval van uitval en is niet bedoeld als permanente stroomvoorziening.
- Steek de voedingsconnector in de voedingsaansluiting aan de onderzijde.
- Steek de stekker in een geschikt stopcontact. De tijd wordt weergegeven en u kunt het uurformaat instellen.

LET OP: Alle instellingen gaan terug naar de normale tijdmodus na 6 sec.. Druk op de TONE-knop om af te sluiten als u de instellingen wilt verlaten.


5. Eenheid omschrijving

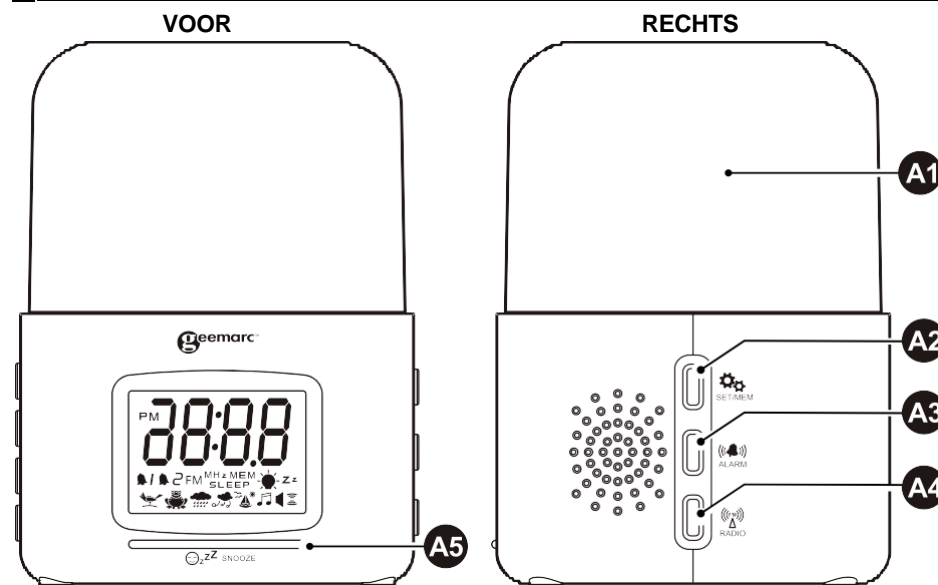


- A1. LED Licht
- A2. SET/MEM-knop (tijd instellen en opslaan van radiozenders)
- A3. ALARM-knop (alarmtijd en alarmbron instellen)
- A4. RADIO knop (radiofunctie activeren)
- A5. SNOOZE knop (voor het activeren van de snoozefunctie, goodnightfunctie of Wake-up Light-functie)

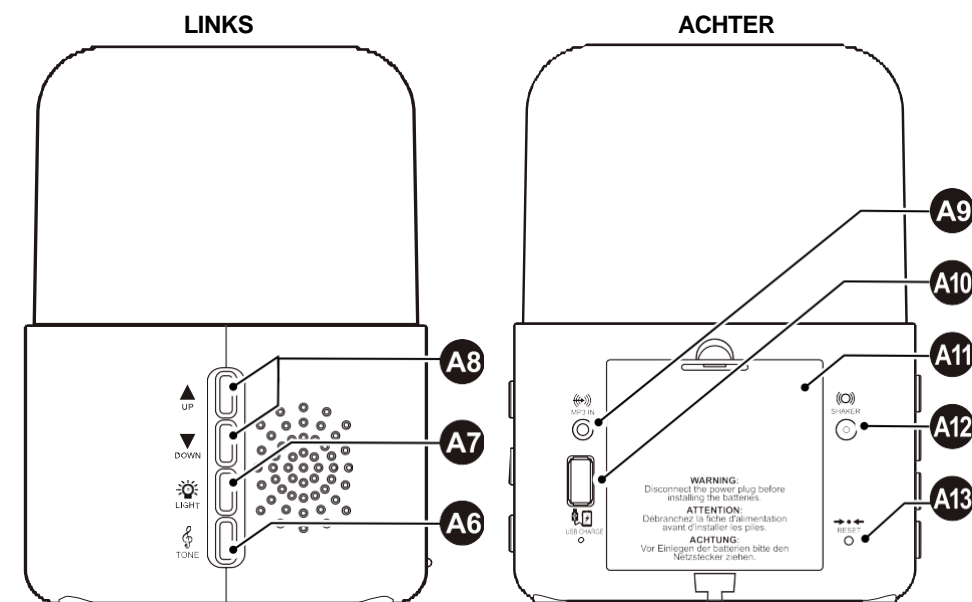

- A6. TONE -knop (aanpassen van het volume en het selecteren van het alarmgeluid)
- A7. LIGHT knop (voor het in-/uitschakelen van het licht en het aanpassen van het achtergrondlicht en de kleurmodusselectie)
- A8. UP/Down button (aanpassen van de tijd, het alarm en het volume)
- A9. Aux -ingang (voor het aansluiten van MP3)
- A10. USB-poort (opladen van de smartphone)
- A11. Batterijcompartiment met deksel
- A12. Shaker-aansluiting (voor het aansluiten van de shaker)
- A13. Reset-gat (resetten van het apparaat naar fabrieksinstellingen)
- A14. Schakelende voedingsadapter (selecteer de juiste adapter)

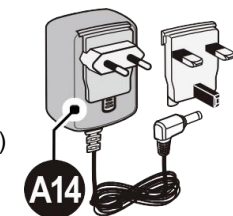

6. Weergavebeschrijving

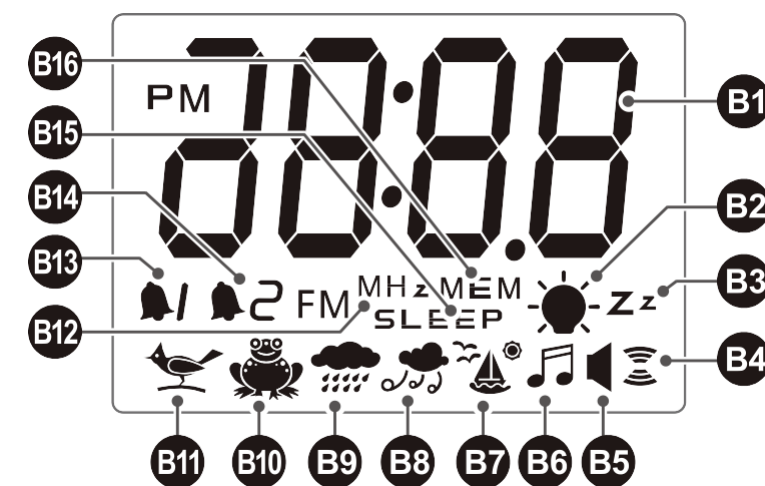

- B1. Tijd / alarmtijd of radiofrequentie
- B2. Lichtsymbool
- B3. Good night
- B4. Shaker
- B5. Piepalarm geluid
- B6. Radio
- B7. Meeuwengeluid
- B8. Windgeluid
- B9. Regenwoudgeluid
- B10. Kikkergeluid
- B11. Vogelgeluid
- B12. FM-radiofrequentie
- B13. Alarm 1
- B14. Alarm 2
- B15. Slaap
- B16. Radiozendergeheugen

7. Bediening

OPMERKING: Alle instellingen gaan terug naar de normale tijdmodus na 6 seconden. Druk op de TONE-knop om af te sluiten als u de instellingen wilt verlaten.

7.1 Instellen van de tijd

• Druk op de SET MEM knop, het uur begint te knippen..	12:00
• Druk op de Up ▲ knop om het uur in te stellen.	12
• Druk op de DOWN ▼ knop om de minuten in te stellen.	00
• Druk op de SET MEM knop en kies tussen 12 en 24 uur formaat met de UP▲ / DOWN▼ knoppen.	12 hr
• Druk op SET MEM knop om de sluimertijd in te stellen, van 5 tot 30 minuten in stappen van 5 minuten (standaard is 5 minuten) met de UP▲ / DOWN▼ knoppen.	Zz 05
• Druk op de SET MEM knoppen, de tijd is nu ingesteld.	12:00

7.2 Instellen en activeren van het alarm

<ul style="list-style-type: none"> • Druk één keer op ALARM-knop om het Alarm 1 in te stellen • Druk twee keer op ALARM-knop om het Alarm 2 in te stellen • Druk op de ALARM knop totdat OFF verdwijnt • Stel alarmtijd in door op UP▲ of DOWN▼ te drukken 	
<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de SET MEM knop en kies tussen de geluiden van vogel, kikker, regenwoud, wind, meeuw, radio of piep. 	
• Druk op de ALARM knop, het alarmgeluid is ingesteld.	12:00
• Druk op de SET MEM knop, om shaker vibratie in te schakelen.	
• Druk op de ALARM knop, het alarm is ingesteld en het Alarm 1-icoon licht op als dit is geselecteerd. Als Alarm 2 is geselecteerd, licht het Alarm 2-icoon op	

OPMERKING: Tijdens het alarm drukt u op de alarmknop om het permanent te stoppen.

7.3 Het wake up licht instellen

• Houd de SNOOZE knop ingedrukt totdat "wake'n shake" wordt weergegeven. Stel de wake'n shake-lichtfunctie in. Het standaard wake'n shake-licht is "OFF".	OFF
• Druk op UP▲ or DOWN▼ knop, om de wake'n shake-lichttijd in te stellen op 15 of 30 minuten. Het wake'n shake-licht is ingesteld en zal geleidelijk oplichten voor de alarmtijd.	15 30

7.4 Alarm uitschakelen

<ul style="list-style-type: none"> • Druk 1 keer op ALARM knop om Alarm 1 uit te schakelen • Druk 2 keer op ALARM knop om Alarm 2 uit te schakelen 	
• Druk op de ALARM knop totdat OFF wordt weergegeven, het alarm is nu uitgeschakeld.	OFF

7.5 Alarm inschakelen

• Druk op de ALARM knop totdat OFF vervaagt. Alarm is weer ingeschakeld.	
--	--

LET OP: Het wake'n shake licht wordt uitgeschakeld als het alarm **OFF** aangeeft.

7.6 Alarm geluid

• Druk op de TONE knop in de normale tijdmodus. Instellen van de toon in 10 frequenties. Standaard toon is #5 frequentie	F05
• Druk op de UP▲ or DOWN▼ knop om de gewenste toonfrequentie in het alarm te selecteren.	

7.7 Alarm Volume

• Druk op de UP▲ - of DOWN▼ -knop in de normale tijdmodus. Selecteer het volume van het alarm. Standaard volume is U08 en het maximale niveau is U20.	U08
--	------------

7.8 Verbinden van de Shaker Vibrator

• Sluit de shaker vibrator aan op de achterste jack .	
---	--

7.9 Licht Functie

• Druk op de LIGHT -knop in de normale tijdmodus. Gebruik het apparaat als normale lamp. Het licht zal geleidelijk oplichten met het lichticoon aan.	
• Druk op de UP▲ - of DOWN▼ -knop om de lichtintensiteit aan te passen. De standaardintensiteit is L07, en de maximale intensiteit is L15.	L07
• Druk nogmaals op de LIGHT -knop. Om het licht uit te schakelen en het lichticoon zal vervagen.	

7.10 Radio Functie

• Druk op de RADIO knop in de normale tijdmodus. De momenteel ingestelde radiofrequentie verschijnt op het display.	
• Druk op de UP▲ - of DOWN▼ -knop. Stel de gewenste radiofrequentie in. Tip: om de automatische scan te starten, drukt u kort op de UP▲ - of DOWN▼ -knop en laat deze vervolgens weer los.	
• Druk op de TONE knop. Het standaardvolume U06 wordt weergegeven op het display	U06
• Druk op de UP▲ or DOWN▼ knop. Pas het volume aan, waarbij het maximale volume U12 is..	

7.11 Radiozender opslaan / opgeslagen radiozenders beluisteren

• Druk op de SET MEM knop tot da S01 is weergegeven. Het huidige radio station is opgeslagen in S01.	S01 S02
• Druk op SET MEM knop totdat S02 is weergegeven. Het nieuwe gewenste radio station is opgeslagen in S02. Er kunnen maximaal 10 radiostations worden opgeslagen	
• Druk op SET MEM knop. Luisteren naar de vooraf ingestelde radiostations begint in de volgorde S01 > S02 > S03.	

7.12 Goodnight functie

• Druk op de SNOOZE knop totdat OFF SLEEP is weergegeven.	OFF SLEEP
• Druk op de UP▲ or DOWN▼ knop om de gewenste uitschakeltijd te selecteren van 5 minuten tot 90 minuten.	
• Druk op de TONE knop om af te sluiten of wacht 6 seconden. De geselecteerde uitschakeltijd begint te tellen met het knipperende SLEEP -icoon.	
• Druk op de SNOOZE knop totdat de resterende tijd wordt weergegeven. Deze functie schakelt automatisch de radio, MP3 of een natuurgeluid uit na een ingestelde periode.	

7.13 Displayverlichting

• Druk op de LIGHT knop totdat U03 wordt weergegeven in de normale tijdmodus. Pas de helderheid van 't display aan door op de LIGHT -knop te drukken. De helderheid verandert van U03 > U04 > U01 > U02, waarbij de maximale helderheid U04 is. U03	U03
--	------------

7.14 MP3-weergavefunctie

<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de RADIO knop. • Sluit de MP3-speler aan op de achterste jack-ingang met een kabel. • AU wordt weergegeven op het scherm.. 	AU
<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de TONE knop. Het standaardvolume U06 wordt weergegeven op het scherm. • Druk op de UP▲ or DOWN▼ knop om het volume aan te passen, waarbij het maximale volume U06 is. 	U06

7.15 Smartphone oplaadfunctie

• Sluit de smartphone aan met een USB-kabel op de achterste USB-aansluiting om de smartphone op te laden.	
--	--

8. Reiniging en Onderhoud

- Reinig het apparaat met een droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Bescherm het apparaat tegen stoten, vocht, stof, chemicaliën, drastische temperatuurschommelingen en nabijgelegen warmtebronnen (zoals ovens en kachels).

9. Technische Gegevens

- **Afmetingen:** 120 x 170 x 120 mm
- **Gewicht:** ongeveer 508 g
- **Voedingsspanning:** 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
- Beschermingsklasse II
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- **Radiofrequentiebereik:** 87,5-108,0 MHz FM
- **Verlichtingssterkte:** 300 lux

10. GARANTIE

Vanaf het moment dat uw Geemarc-product is gekocht, garandeert Geemarc dit voor een periode van twee jaar. Gedurende deze tijd zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons eigen inzicht) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze hulplijn of bezoek onze website op www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongevallen, nalatigheid of breuken aan onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of uit elkaar worden gehaald door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van Geemarc is. De garantie van Geemarc beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW KASSABON IS DEEL VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM.

Let op: De garantie is alleen van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

11. VERKLARINGEN:

CE Richtlijnen

Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED 2014/53/UE. De CE-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.geemarc.com.

Recycling richtlijnen

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is opgesteld zodat producten aan het einde van hun levensduur op de best mogelijke manier worden gerecycled. Wanneer dit product aan het einde van zijn levensduur is, gooi het dan niet in uw huisvuilbak. Gebruik een van de volgende verwijderingsopties:

- Verwijder de batterijen en deponeer deze in een geschikte WEEE-container.
- Deponeer het product in een geschikte WEEE-container.
- Of geef het oude product aan de verkoper. Als u een nieuw product koopt, moet de verkoper het oude accepteren.

Door deze instructies op te volgen, zorgt u voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



Voor productondersteuning en hulp Bezoek onze website op www.geemarc.com
erenigd Koninkrijk: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City,
Hertfordshire, AL7 1SB,UK telefoon
01707 387602 of fax **01707 832529**